

SimPad Plus Netzwerkverbindung prüfen

1. Verbinden sie SimPad Plus und Simulator mit einem Netzwerkkabel.
2. Schalten Sie beide Geräte wie gewohnt ein.
3. Wechseln Sie vom Startbildschirm des SimPad in die Einstellungen.
4. Prüfen Sie im obersten Menüpunkt, ob das SimPad mit dem richtigen Simulator verbunden ist. Wählen Sie ggf. den richtigen Simulator. Anschließend gehen sie einmal rechts oben auf „zurück“.
5. Im Menüpunkt Wi-Fi wird ihnen der der Verbindungstyp angezeigt. Taucht hier SimLink oder my-simpad-net auf, kann in diesem Menü die Verbindung zu einem geeigneten Netzwerk aufgebaut werden. Wichtig: Bitte befassen Sie sich mit den weiteren Dokumenten, um die Eignung des Netzwerks sicherzustellen.

