


# Initiale Updates (Windows, LLEAP & SimPad)

In diesem Dokument zeigen wir Ihnen, wie Sie die wichtigsten Updates bei Windows, LLEAP und SimPad downloaden und installieren können. Regelmäßige Updates sind notwendig, um eine fehlerfreie Simulation zu gewährleisten.


## WINDOWS UPDATES

Klicken Sie in die Windows-Suchleiste, geben Sie „Updates“ ein & wählen Sie den Eintrag „Nach Updates suchen“ aus:

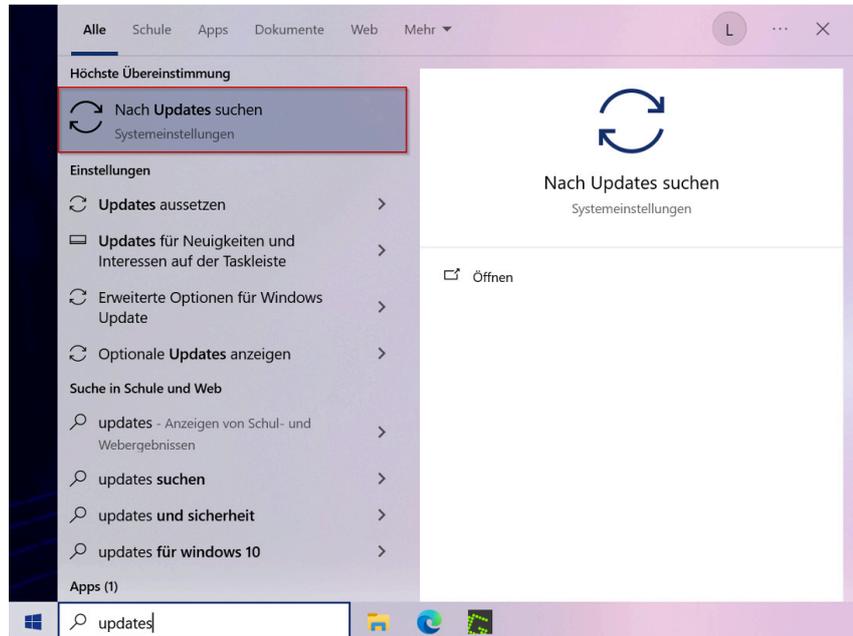

2 Es öffnet sich das Windows Update Fenster. Drücken Sie auf das Feld „Nach Updates suchen“:

*Hinweis: Auch als „optional“ angezeigte Updates sollten installiert werden.*

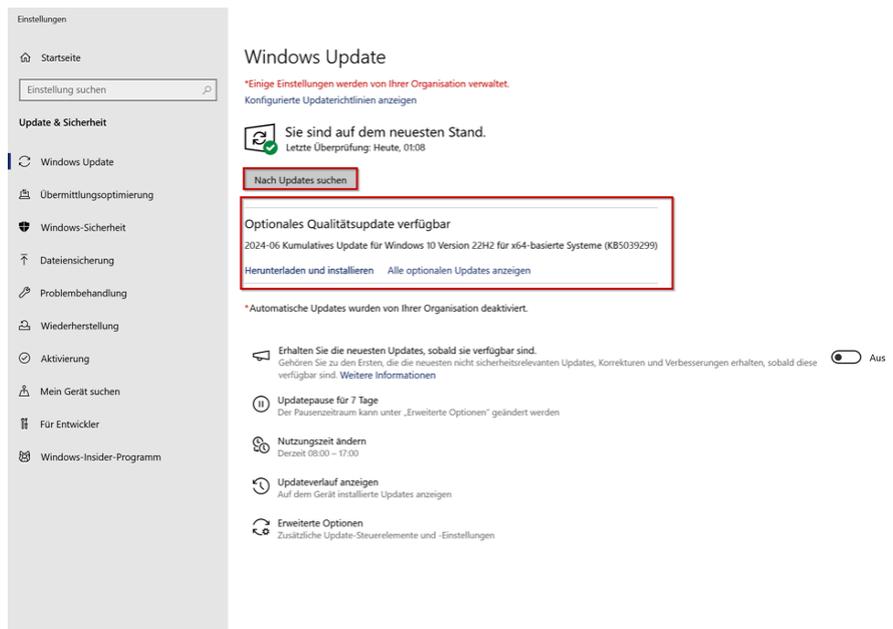

## WINDOWS UPDATES

- 3 Sobald der Vorgang beendet ist, starten Sie bitte den Computer neu:

### Windows Update

\*Einige Einstellungen werden von Ihrer Organisation verwaltet.

Konfigurierte Updaterichtlinien anzeigen



#### Neustart erforderlich

Ihr Gerät wird außerhalb der Nutzungszeit neu gestartet.

2024-06 Kumulatives Update für Windows 10 Version 22H2 für x64-basierte Systeme (KB5039299)

Status: Neustart ausstehend

Jetzt neu starten

Neustart planen

Optionale Updates anzeigen

- 4 Wiederholen Sie den Vorgang, bis keine Updates mehr verfügbar sind. Ihnen wird angezeigt, wenn Sie sich „auf dem neuesten Stand“ befinden.

The screenshot shows the Windows Settings application with the 'Windows Update' section selected. The status is 'Sie sind auf dem neuesten Stand.' (You are up to date). A red box highlights this message and the 'Nach Updates suchen' (Check for updates) button. Below, there are sections for 'Optionale Updates anzeigen', 'Nutzungszeit anpassen, um Unterbrechungen zu reduzieren', and 'Automatische Updates wurden von Ihrer Organisation deaktiviert.' There are also links for 'Erhalten Sie die neuesten Updates, sobald sie verfügbar sind.', 'Updatepause für 7 Tage', 'Nutzungszeit ändern', 'Updateverlauf anzeigen', and 'Erweiterte Optionen'.

Sie haben erfolgreich Ihren Windows-PC geupdated!

## LLEAP UPDATES

Öffnen Sie den LLEAP-Startbildschirm. Nach dem Ausführen von Windows-Updates, zeigt Ihnen der grüne Pfeil an, dass Updates verfügbar sind. Wählen Sie „Updates available“ aus:


The screenshot shows the 'Laerdal Simulation Home' interface. At the top, there is a 'Sign in' button. Below, the interface is divided into three main sections: 'Simulate', 'Record & Design', and 'Setup'. In the 'Simulate' section, there is a large 'LLEAP' logo and a green arrow icon with the text 'Updates available!'. Other icons in this section include 'Patient Monitor', 'Diffusion Monitor', 'EFM', and 'AED'. The 'Record & Design' section includes 'SimDesigner', 'Trend Editor', 'Session Viewer', and 'Content Converter'. The 'Setup' section includes 'License Manager', 'Simulator Troubleshooting', 'Profile Editor', 'Folder Path Editor', and 'Network Selector'.

## LLEAP UPDATES

2 Nachdem Sie „Updates available“ ausgewählt haben, öffnet sich folgendes Fenster:

Für einen Instruktor-PC soll die Anwendung „LLEAP“ heruntergeladen und über den Updater installiert werden.

Für einen Patientenmonitor einfach die Anwendung „Patient Monitor“ auswählen, herunterladen und installieren.

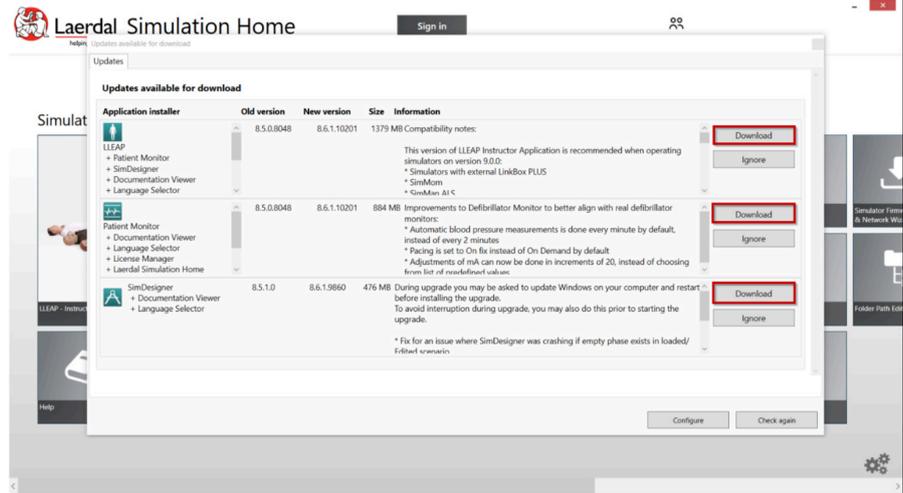


*Sie haben erfolgreich Ihre LLEAP-Software geupdated!*

## SIMPAD

1 Starten Sie das SimPad und wählen Sie auf dem Startbildschirm den Button „Update“ aus:



2 Drücken Sie auf „Nach Updates suchen“ und installieren Sie die angezeigten Updates

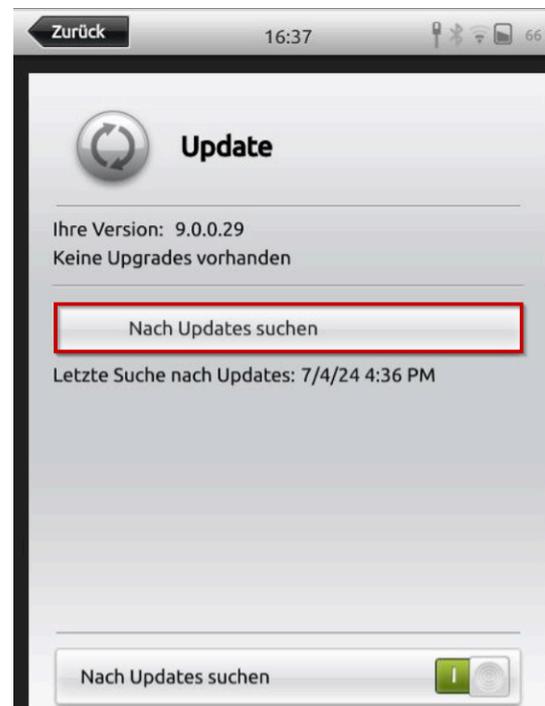

*Sie haben erfolgreich Ihr SimPad geupdated!*