



Erste Einrichtung des WiFi für SimPad PLUS

Für eine optimale Netzwerk-Lösung empfehlen wir, Ihren Simulator und andere Geräte mit einem dedizierten WiFi-Netzwerk zu verbinden. Bevor Sie eine Verbindung zu einem neuen WiFi-Netzwerk herstellen, verbinden Sie den Simulator und SimPad PLUS mit einem Netzwerk Kabel und folgen Sie diesem Prozess.

1 SimPad und Simulator mit einem Kabel verbinden

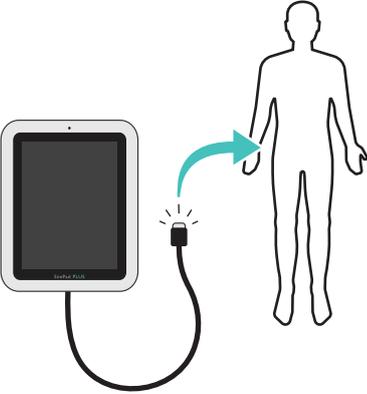

2 Simulator einschalten

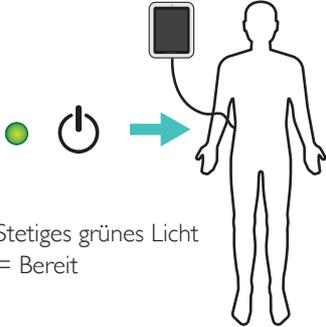


Stetiges grünes Licht = Bereit

3 SimPad PLUS einschalten



4 Simulator auswählen

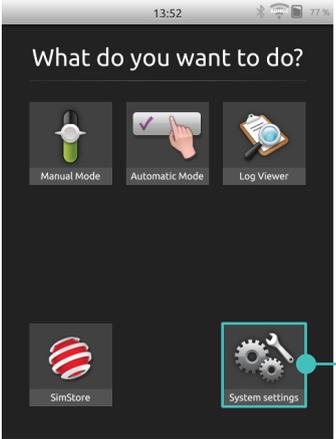


Drücken und den verbundenen Simulator auswählen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

5 WiFi-Netzwerk auswählen



Drücken und das bevorzugte WiFi-Netzwerk auswählen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

6 Mit PC und Patientenmonitor verbinden (Optional)

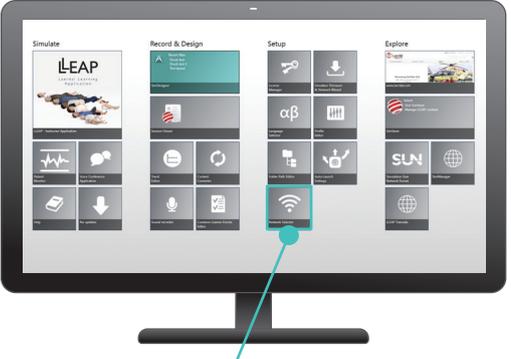


PC einschalten und Laerdal Simulation Home öffnen, dann "Network Selector" öffnen. Das gleiche WiFi-Netzwerk wie beim Simulator auswählen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Wenn das Netzwerk eingerichtet ist, können Sie das Netzwerk Kabel trennen. Wenn Sie bei zukünftigen Simulationssitzungen Verbindungsprobleme haben oder sich mit einem neuen WiFi-Netzwerk verbinden möchten, wiederholen Sie diesen Prozess.


Erste Einrichtung des WiFi für PC

Für eine optimale Netzwerk-Lösung empfehlen wir, Ihren Simulator und andere Geräte mit einem dedizierten WiFi-Netzwerk zu verbinden. Bevor Sie eine Verbindung zu einem neuen WiFi-Netzwerk herstellen, verbinden Sie den Simulator und den PC mit einem Netzwerkkabel und folgen Sie diesem Prozess.

1 PC und Simulator mit einem Kabel verbindend

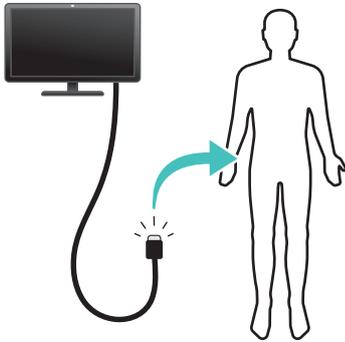


2 Simulator einschalten

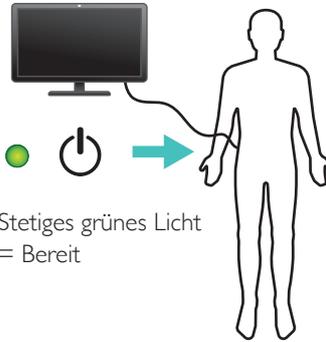

3 PC einschalten und Laerdal Simulation Home öffnen




4 Simulator auswählen

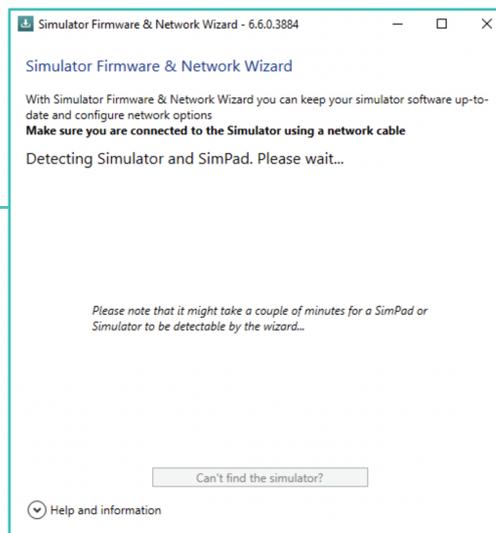

„Simulator & Network Wizard“ öffnen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen

5 WiFi-Netzwerk auswählen

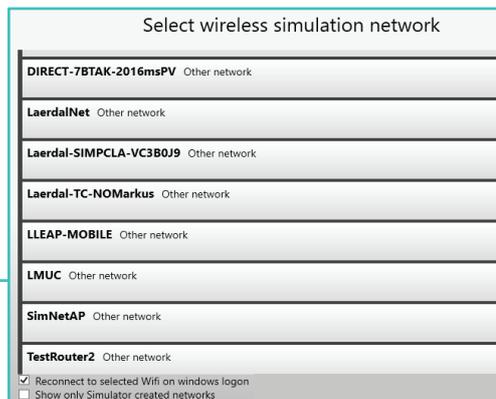

„Network Selector“ öffnen. Das gleiche WiFi-Netzwerk wie beim Simulator auswählen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Diesen Schritt auf einem zweiten PC wiederholen, um den Patientenmonitor einzurichten (Optional)

Wenn das Netzwerk eingerichtet ist, können Sie das Netzwerkkabel trennen. Wenn Sie bei zukünftigen Simulationssitzungen Verbindungsprobleme haben oder sich mit einem neuen WiFi-Netzwerk verbinden möchten, wiederholen Sie diesen Prozess.