

Kurzanleitung zur Namensgebung SimPad / LinkBox

Schritt 1: Öffnen Sie die Benutzeroberfläche und wählen Sie Einstellungen aus.



Schritt 2:

Wählen Sie „Details SimPad“ aus, um dem SimPad einen Namen zu geben.
Wählen Sie „Details zum Simulator“ aus, um dem Simulator einen Namen zu geben.



Schritt 3: Wählen Sie das „Bearbeiten-Symbol“ aus, um den Namen von SimPad oder Simulator zu editieren



Schritt 4: Geben Sie den neuen Namen ein und bestätigen Sie mit „OK“.

